


Dual-Air nastavitelný vzduchovod DA200 Dětský

Ústní blok

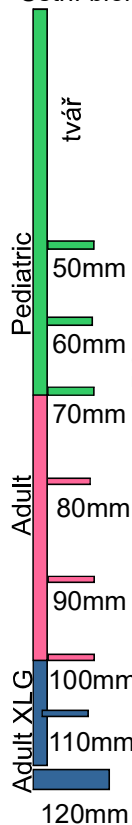

Návod k použití:

- Přiložte ústní vzduchovod Dual-Air k tváři pacienta, čelo ústního bloku od koutku úst pacienta, zakřivený konec deflektoru jazyka směrem ke špičce ušního lalůčku.
- Vytáhněte deflektor jazyka zpět (k sobě), při ponechání ústního bloku u koutku úst, až bude deflektor jazyka kopírovat vnější hranu čelisti.
- Vložte ústní vzduchovod otevřením pacientových úst. Vkládejte vzduchovod ze strany (otoč o 90°), s vrácením zpět o 90° do příslušné polohy, určené k fixaci kořene jazyka.

Pokud se zlepšuje stav pacienta při probírání z bezvědomí (LOC), použití nastavení deflektoru jazyka o poloviční krok, může být pro pacienta komfortnější.

Pacient by měl být neustále monitorován po dobu používání tohoto prostředku!
Tento prostředek by měl být používán pouze vyškolenými osobami s ohledem na návod k použití.

Invazivní zdravotnický prostředek I.třídy. Nesterilní.
Neobsahuje latex. Pouze pro jednorázové použití.

CE

ARMDD151356A151012LN pro:
NuZone Medial LLC - NuZoneMedical.com
Chráněno patentem: #12409022 a 13023873, Vyrobeno v Číně

Distributor a EU import:

BlueAlarm Ltd., Kaprova 42/14, 11000 Praha 1, Czechia,
<http://dual-air.eu> Info@dual-air.eu Tel.: +420 608 654 827